


Entfernen Sie vollgesogene Zecken (A)
anders als kleine Zecken (B)

A) Die Einkerbung der Greiftasche möglichst hautnah unter die Zecke schieben und die Zecke aus der Haut herausziehen.

B) Zeckenzange öffnen, Zecke möglichst hautnah fassen und herausdrehen.

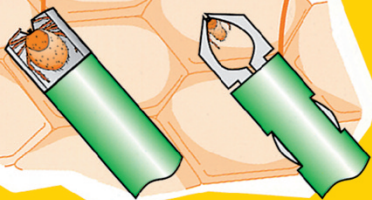

Vorsicht Zecken

Mit der Original
Zecken-Zange Ultra
nach Dr. G. Schick
entfernen Sie ganz
einfach diese
gefährlichen
Plagegeister

Zecken-Zange Ultra

EU + US-Patent

made in Germany

www.zeckenzange.eu



1. Drucktasten drücken
2. Zange an der Zecke anlegen
3. Zecke langsam herausdrehen

**Anzuwenden
bei Mensch
und Tier !**



Bei der Entfernung kein Öl o.ä. verwenden, da sonst erhöhte Infektionsgefahr besteht, Einstichstelle desinfizieren.
Bei ersten auftretenden Anzeichen einer Infektion (Hautrötung, Unwohlsein, grippaler Infekt) auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

LOT 4217



CE

 **Dr. SCHICK**

D-74889 Sinsheim
www.zecken-zange.de



PZN -07662141