


A) Removal of distended ticks  
 Extracción de garrapatas llenas  
 Élimination des tiques  
 accrochées à la peau  
 Rimozione di zecche gonfie

B) Removal of small ticks  
 Extracción de garrapatas pequeñas  
 Élimination des petites tiques  
 Rimozione di piccole zecche

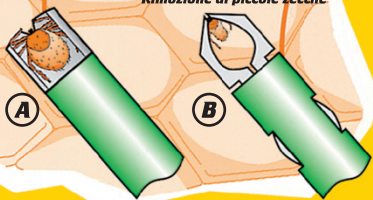

**Watch out for ticks  
 ¡Cuidado, garrapatas!  
 Attention aux tiques  
 Attenzione zecche**

Original by Dr. G. Schick  
 Producto original del Dr. G. Schick  
 Un produit original du Dr. G. Schick  
 Prodotto originale del Dr. G. Schick

**Ticktweezers Ultra** EU-Patent  
**Garra-Pinzas Ultra** EU-Patent  
**Pince à tiques Ultra** Brevet UE  
**Pinza per zecche Ultra**  
 Brevetto europeo

**Grab and twist out ticks  
 Colocar las pinzas, girar y sacar la garrapata  
 Saisir la tique et la tourner  
 Afferrare la zecca il più possibile vicino alla pelle  
 e rimuoverla con un movimento di rotazione**

**For humans and animals  
 Apto para uso en personas y animales  
 Pour les hommes et  
 les animaux  
 Per uomo e animale**



Disinfect the bite. Consult a doctor if an infection occurs (reddening of the skin, nausea, flu-like symptoms).  
 Desinfectar la herida. Ante cualquier sintoma de infección (enrojecimiento de la piel, malestar general, infección gripal) acuda al médico.  
 Désinfecter la zone de la piqûre. En cas de symptômes infectieux (rougeur de la peau, nausées, affection similaire à la grippe), il convient de consulter un médecin.  
 Disinfettare la puntura. Consultare un medico se si constatano segni di un'infezione (arrossamento della cute, senso di malessere, sintomi simili ad un'influenza).

www.tick-tweezers.com  
 www.pinceatique.org  
 made in Germany



LOT 1217



**Dr. SCHICK**

D-74889 Sinsheim 4 016353 766223

