

Original von Dr. Schick

Zeckenzange

Medizinprodukt

Zur einfachen und sicheren
Entfernung von Zecken



Anwendung
bei Mensch
und Tier




Made in Germany

www.zeckenzange.eu



PZN -03741375

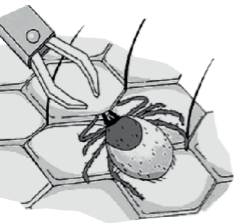

Gebrauchsanweisung:

Drücken Sie auf den Druckknopf und öffnen Sie die Zange. Fassen Sie mit den Greifern die Zecke möglichst hautnah und drehen Sie die Zecke heraus (2-3 Umdrehungen), die Drehrichtung ist hierbei nicht von Bedeutung.

Hinweise:

Kein Öl oder andere Substanzen auf die Zecke auftragen. Festgesogene Zecken sollten baldmöglichst entfernt werden, da mit der Dauer des Saugaktes die Infektionsgefahr steigt. Es sollten alle Teile der Zecke entfernt werden, um eine Entzündung oder Infektion zu vermeiden. Nach Entfernung der Zecke sollte die Stichstelle und die Zange mit 70% Alkohol desinfiziert sowie das Datum des Zeckenstichs notiert werden. Bei Anzeichen einer Infektion, z.B. Rötungen, Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein oder grippeähnlichen Symptomen, muss unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Vorsicht in Wald und Wiese:

Zecken finden sich im Unterholz, an Waldrändern, an Sträuchern und Büschen, vor allem auch im hohen Gras. Das Tragen von heller und geschlossener Kleidung erleichtert das Erkennen von abgestreiften Zecken.

Zecken als Überträger von Krankheitserregern:

- Borreliose: jährlich mehr als 100.000 Neuerkrankungen in Deutschland, eine Antibiotikabehandlung ist möglich.
- Ehrlichiose (HGE): ca. 2-4 % der Zecken sind mit Ehrlichien infiziert, Hauptsymptome Muskel-/Gliederschmerzen, Fieber
- FSME: jährlich ca. 400 Fälle in Deutschland (Risikokarte mit Hochrisikogebieten bei www.zeckenzange.eu)
- Weitere Krankheiten: Rickettsiose, Babesiose, Q-Fieber, Bartonellose

Internationale Studien:

Eine Untersuchung der Veterinärmedizinischen Universität Wien beweist eindrucksvoll, dass mit einer Zeckenzange festgesogene Zecken einfach und leicht herausgedreht werden können. Untersucht wurden 5 verschiedene Instrumente, eine Zeckenzange erhielt mit Abstand die beste Bewertung (Note 1,3). In weiteren Studien (Niederlande, Frankreich) wird bestätigt, dass beim Herausdrehen von Zecken mit einer Zeckenzange auch weniger Anteile von Mundwerkzeugen in der Haut zurückbleiben und bei der Entfernung weniger Kraft und Druck auf die Zecke ausgeübt werden muss. Anwender bestätigen, dass mit der Zeckenzange eine Zecke einfach und komplett entfernt werden kann (Quelle: PMCF Dr. Schick). Weitere Infos unter www.zeckenzange.eu, mit weltweiter Literatur über Entfernungstechniken, Krankheitserreger sowie mit einem kleinen Film „Wie entfernt man eine Zecke“.

UDI-DI 4016353010524



2041-12-31

LOT 0322



Dr. Schick GmbH
74889 Sinsheim



Vertriebspartner:
inkosmia GmbH & Cie. KG
35576 Wetzlar



4 016353 010524